

D_CORE

Deep Core


品番
マッサージチェア DC-100J
マッサージチェア DC-001J

取扱説明書

添付文書

家庭用

このたびは、D_Coreをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この製品は、疲労の回復・改善を目的としたさまざまなマッサージがお楽しみいただけます。皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして、末永くご愛用ください。

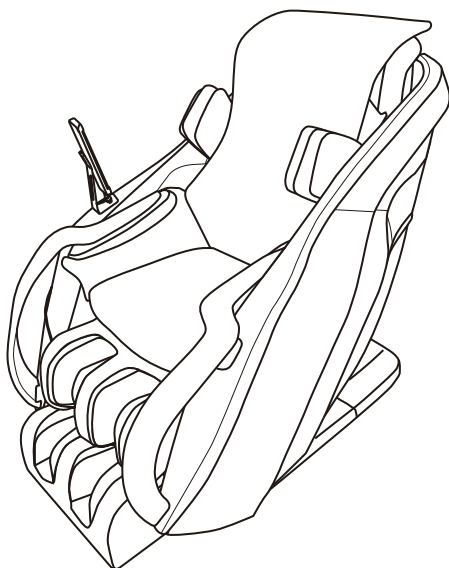

もくじ

■ 安全上のご注意	1
■ 各部の名称とはたらき	8
■ ご使用の前に	10
■ 椅子の調節	15
■ 操作方法	17
■ 自動コース	18
■ 手動コース	20
■ 故障かな?と思ったら	22
■ 安全のために点検を	23
■ Q&A	24
■ お手入れと保管の仕方	25
■ アフターサービスについて	26
■ 仕様	27
■ 販売元・お問い合わせ窓口	裏表紙

- ◎ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
- ◎この製品は、一般家庭用として設計されていますので、一般家庭以外(業務用など)でご使用の場合は、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。

マッサージチェアの使用目的又は効果効果

あんま、マッサージの代用。

- ・疲労の回復・血行の促進・筋肉の疲れをとる
- ・筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みをやわらげる



※本機のリモコンの名称等に「指圧」の文言を使用しておりますが、使用目的または効果に指圧の代用は含まれておりません。





安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名称については8～9ページをご覧ください。

表示の種類

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。


図記号の種類と意味

	○記号は、禁止の行為であることを示しています。 (左図の場合は分解禁止)
	●記号は、行為を強制したり指示したりするものです。 (左図の場合は電源プラグを抜く)



お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

ご使用場所の注意点

注意

 強制	● 床面が水平な場所に置いて使用してください。 → 不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

警告

 禁止	● 浴室やサウナ、湿度の高い場所では使用しないでください。 → 感電や故障の原因になります。
 アース 取り付け	● この製品は必ずアースを接続してください。 → 製品が故障、破損した場合の感電の危険を低減することができます。

ご使用前の注意点

 警告



- 次の人は使用しないでください。
 - ◎ 医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。
 - ◎ 急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人
- 電源は交流100V以外では使用しないでください。
 - 火災や感電の原因になります。
- 変圧器を用いて使用しないでください。
 - 故障や感電の原因になります。
- 電源コードや電源コードのプラグがいたんだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいときなどは使用しないでください。
 - 感電・ショート・発火の原因になります。



- 次の人は、使用前に医師に相談してください。
 - ◎ 心臓に障害のある人 ◎ 治療部位に創傷のある人
 - ◎ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - ◎ 骨粗しょう(鬆)症の人やせきつ(脊椎)の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
 - ◎ 体温38℃以上(有熱期)の人 例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期。衰弱しているとき。
 - ◎ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 - ◎ ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - ◎ 背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人
 - ◎ かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する
 - ◎ 悪性のしゅよう(腫瘍)のある人
 - ◎ 安静を必要とする人 ◎ 内臓疾患などの急性症状のある人
 - ◎ 医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人
 - ◎ リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人
 - ◎ めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎ 捻挫、肉離れなどの炎症性の人
 - ◎ 腱鞘炎、またはそのおそれがある人
 - ◎ 温度感覚喪失が認められる人【ヒーター搭載機種のみ】
- マッサージの前には必ず本体の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、販売元(裏表紙に記載)にご連絡ください。本体布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。
 - 布地が破れた状態で使用すると、事故やケガ・感電のおそれがあります。
- 特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
- 使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。
- お子様やペットが本機を使用して遊ばないようにしてください。
- 低温やけどの恐れがありますので、使用時間を厳守してください。

【安全上のご注意】

安全上のご注意

ご使用前の注意点

注意



禁止

- この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。
また、本機と他の治療器や電気毛布などを併用しないでください。
→体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。
- 人をのせたまま移動しないでください。
→本体の転倒により、事故やケガの原因になります。
- リクライニングを倒したまま椅子に座らないでください。
→フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。
また、本体の転倒により事故やケガの原因になります。
- 付属品以外のものを用いて本機を使用しないでください。



強制

- 電源コードのプラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
→故障や感電の原因になります。
- 電源コードのプラグおよびコネクタは確実に最後まで差し込んでください。
→感電やショート・発火の原因になります。
- ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。
- はじめは弱い刺激でマッサージしてください。
→はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。
特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。
- 安全のために、メカの位置を確認し、収納位置にない場合は、主電源スイッチを入れ、収納したことを確認してからゆっくり座ってください。
- フットレストの上にいる、立つ、座る等の行為はしないでください。
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。
- しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。

【安全上のご注意】

ご使用時の注意点

警告



禁止

- 電源コードを本体に巻きつけたり、本体やフットレストで踏んだりしないでください。また、電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
→コードが破損し、火災や感電の原因になります。
- 本体に水などをこぼさないでください。
→感電やショート・発火の原因になります。
- めれた体で座ったり、めれた手で操作したりしないでください。
→感電や故障の原因になります。
- お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺(背もたれの後ろやフットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上へのせたり、座らせたりしないでください。
→事故やケガの原因になります。
- 椅子に2人以上座ってのご使用はおやめください。特に小さなお子様(乳児など)を抱きかかえてのご使用はおやめください。
→事故やケガの原因になります。
- 布地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。
→事故やケガ・感電の原因になります。修理は販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。
- 点灯中、および消灯直後のLED部分に直接触れないようにしてください。
→感電や故障の原因になります。
- 腕時計やネックレスなど、アクセサリーを身につけた状態で使用しないでください。
→事故やケガの原因になります。



強制

- マッサージコース開始前やリクライニングを倒すときや起こすとき、必ず周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろやフットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。
→事故やケガの原因になります。
- 体や物がはさみこまれた場合、リクライニングボタンを押して安全な位置まで戻してください。
- 布や紙、ビニール袋など、燃えやすいものをLED部分にかぶせたり接触させたりしないでください。
- 本機(特にLED部分や電源コード)の隙間などに金属類(ヘアピン、針金)などを差し込まないでください。
→感電やショート・発火の原因になります。

【安全上のご注意】

安全上のご注意

ご使用時の注意点

注意



禁止

- 素肌では使用しないでください。
- マッサージおよび椅子以外の用途に使用しないでください。
→事故やケガの原因になります。
- もみ玉が上下する部分や、リクライニングなどの可動部に手を入れないでください。また、ベルトなどのかたい物をつけて使用しないでください。
→ケガや故障の原因になります。
- 頭部、胸部、腹部、関節部(ひじ、ひざなど)には使用しないでください。
→気分が悪くなったり、ケガの原因になります。
- 無人で動作させないでください。
→事故やケガの原因になります。
- フットレストは脚部以外には使用しないでください。
→ケガの原因になります。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れしないでください。
→無理に入れようとする、故障の原因になります。
- アームレストは腕部以外には使用しないでください。
→ケガの原因になります。
- 腕部のマッサージ中にアームレストから腕が抜けた場合、無理に腕を入れしないでください。
→無理に入れようとする、故障の原因になります。
- アームレストのLEDを直視しないようにしてください。
→ケガの原因になります。



強制

- 緊急時や動作中に異常を感じたときは、[緊急停止]ボタンを押して、動作を停止させてください。
- 使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。
- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。
→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- マッサージ中は眠らないように注意してください。
→ケガの原因になります。
- マッサージは、1日30分以内に行ってください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内に行ってください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
- 周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してご使用ください。
→事故やケガの原因になります。
- 背パッドははずしてマッサージしないでください。

【安全上のご注意】

ご使用時の注意

⚠ 注意



プラグを抜く

- 停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して主電源スイッチを「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
→ 停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。
- 落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して主電源スイッチを「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
- 動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して主電源スイッチを「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いて、販売元（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。
→ 感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

ご使用後や使用しないときの注意

⚠ 注意



禁止

- 電源コードは本機以外では使用しないでください。
- 本機を使用後は、必ずリクライニングを完全に起こしてください。
- 物を載せないでください。
- LED灯は交換できません。



強制

- 使用後は必ず主電源スイッチを「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
→ お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。
- 電源コードはねじれをほどいてから保管してください。
→ 電源コードが劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。



プラグを抜く

- 電源コードのプラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源コードのプラグを持って抜いてください。
→ 感電やショートによる火災の原因になります。
- お手入れの際は必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ご使用にならないときは、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
→ ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

【安全上のご注意】

安全上のご注意

その他の注意点

警告



禁止

- 本体の上に立たないでください。座部以外に座るなどして、上から強い衝撃を与えないでください。
→ 転倒による事故やケガ、故障の原因になります。



分解禁止

- 機器が故障した場合は、勝手に修理せず、販売店または販売元（裏表紙に記載）に連絡してください。
- 電源コードが破損した場合、危険ですので電源コードの交換は販売元（裏表紙に記載）に依頼してください。
- 機器は改造しないでください。
→ 火災や感電、ケガの原因になります。

注意



強制

- 他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。


お願い

- 製品及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

【安全上のご注意】


各部の名称とはたらき

※イラストはイメージです。機種により形状は異なります。

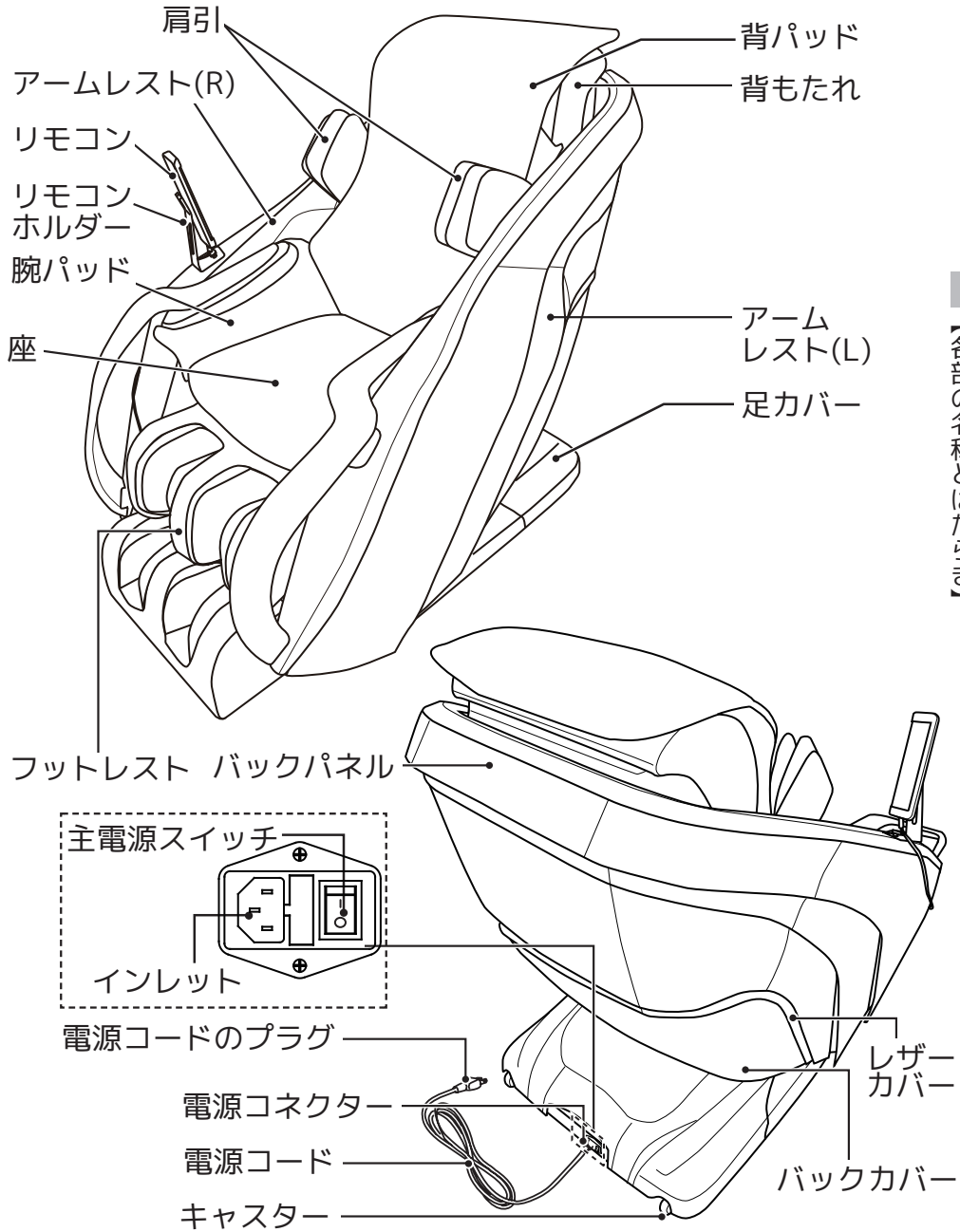

各部の名称とはたらき

【各部の名称とはたらき】

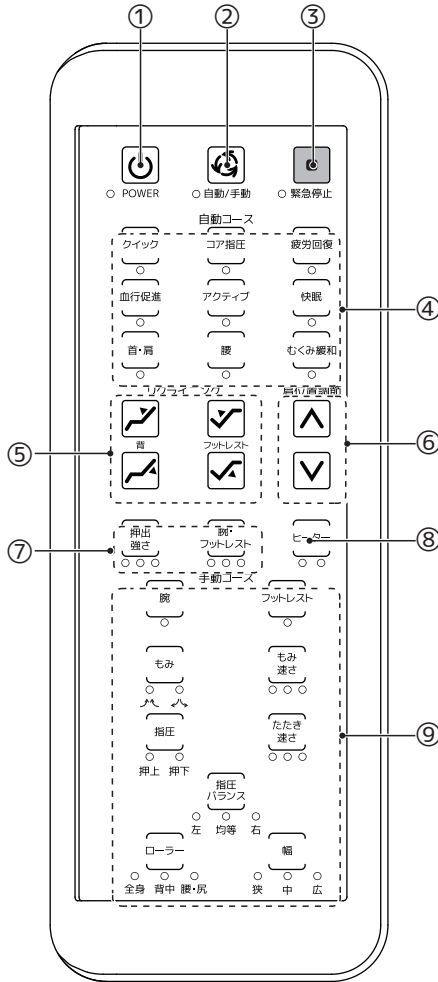

①	POWER	リモコンの電源の「ON」「OFF」を行います。動作中に押すと、チェアが初期位置まで戻ってから停止します。リモコンの電源が「ON」の状態では青色、「OFF」の状態および緊急停止中の時は消灯します。
②	自動/手動 (モード切替ボタン)	自動コースと手動コースの切り替えを行います。リモコンの電源が入ると自動コースが選択でき、消灯しています。ボタンを押すと青色に点灯し、手動コースが選択できるようになります。
③	緊急停止	緊急時や動作中に異常を感じたときに押してください。その場で動作が停止します。
④	自動コース	各ボタンでコースを選択できます。
⑤	リクライニング	リクライニング角度を調節します。
⑥	肩位置調節	指圧点検時の肩位置の調整、お好みコース中のもみ玉の位置の調節に使用します。
⑦	強さ調節 (押出強さ/腕・フットレスト)	メカの押出強さと腕・フットレストの強さを調節できます。
⑧	ヒーター (ヒーター搭載機種)	ヒーターのON/OFFと温度調節ができます。
⑨	手動コース	基本動作や特殊動作を選択できます。

※機種によりリモコンは異なります。
イラストはDC-100J

	警告	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンに水などをこぼさないでください。 ●ぬれた手で操作しないでください。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの上に座ったり、落としたり、踏んだり、コードを強くひっぱったりしないでください。 ●先のとがったものやかたいものでボタンを押さないでください。 →破損の原因になります。

ご使用前に

- この製品は、背もたれが起こされ、肩引が倒された状態で梱包してお届けしています。ご使用前には、必ず肩引を起こしてください。
- 冷えきった室内の温度を上げて使用するときには、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待つてから使用してください。
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。


設置場所について

リクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、本体後ろのスペースは約20cm以上開け、本体前は約70cm以上のスペースを確保してください。

⚠注意

- 浴室やサウナなど、湿度の高い場所では使用しないでください。
- 床面の水平な場所に置いて使用してください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。
- タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。
- エアコンの風が直接当たる場所では使用しないでください。

- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペットは敷かないでください。)
- 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。
- 体重100kgの人が座った状態で1cm²あたり約3.9kgの荷重がかかります。

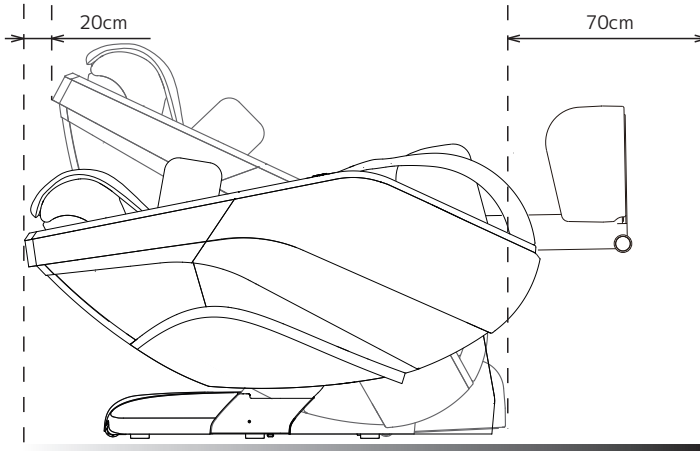

同梱物の確認

梱包箱には本体、フットレスト、アームレスト(L/R)と同梱物が入っていることを確認してください。

本体	フットレスト	アームレスト	同梱物		
			組立ネジ、工具セット (ネジA: 4個、ネジB: 2個、 ネジC: 4個、ネジD: 2個、 プッシュ: 2個、L型レン チ: 1個)		

【ご使用前に】

ご使用前に

設置方法・組立て方法


本機は本体、フットレスト、アームレスト(L/R)が別々に梱包されています。初回の設置の際に、組み立ててご使用ください。また、本機を移動させる場合は逆の手順で分解し、再設置後に改めて組み立ててご使用ください。



注意


- 設置・組立ての際には手や物をはさまないように十分注意してください。
- 設置時に電源コードを足カバーなどで踏まないようにしてください。

- ①座を持ち上げ、フットレストの軸にプッシュを挿入した後、フットレストを矢印の方向に持ち上げて本体に引っ掛けます。

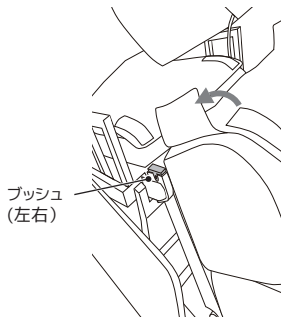


- ②プッシュと本体をネジAで固定します。

※ネジAは小さな座金のネジです。大きな座金のネジCは使用しないよう注意してください。

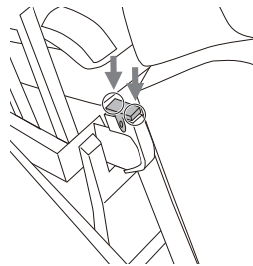


- ③エアーホースとケーブルを接続 (同じ色のホース同士を接続してください。ケーブルは反対には接続できません。)し、図灰色部分のマジックテープを貼り合わせてください。

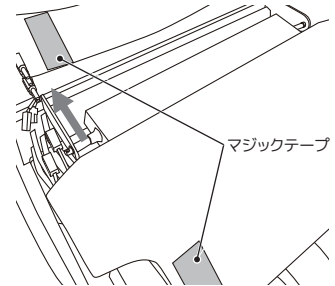


【ご使用前に】

- ④アームレスト後ろ側(図口部分)を本体背中のピンに引っ掛け、アームレスト中央(図○部分)を本体座のフレームに載せます。
※エアーホースやケーブルを挟み込まないよう注意してください。

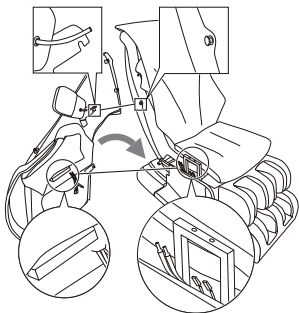

- ⑤A~Cの順でアームレストと本体をネジで固定します。

※Aの箇所にはネジB、B・Cの箇所にはネジCを使用してください。
※肩引が収納されていますので、引き起こしてください。

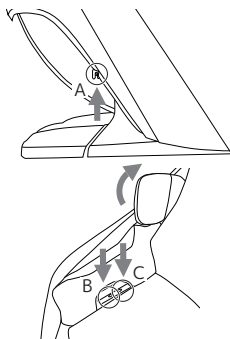


- ⑥エアーホースとケーブルを接続します。(それぞれ同じ色同士を接続してください。)

※機種によりホースやケーブルの数量が異なります。




⑦腕パッドと座のファスナーを取り付けます。

※⑥で接続したエアホースとケーブルは腕パッドの内側に収納してください。

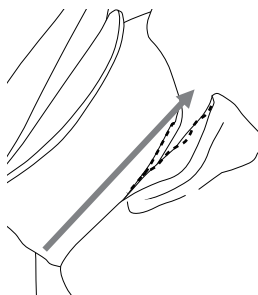


⑧反対側のアームレストも同様に④~⑦の手順で取り付けます。

⑨バックパネルを左右のアームレスト後ろ側のフックに引っ掛け、奥まで押し込みます。その後、パネル下部をネジDで固定します。

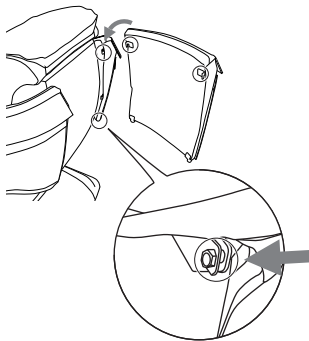


⑩バックカバーをアームレスト前方のフックにかけ、後方のマジックテープで固定します。

※レザーカバーがバックカバーの内側に入り込まないように注意してください。

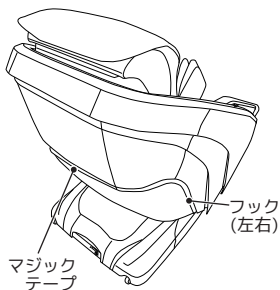


⑪アームレスト(R)のネジを外し、リモコンホルダーを置いてネジを再取り付けします。リモコンホルダーは取り付け前にお好みの角度に調整してください。

※リモコンのケーブルを挟まないように注意してください。
※角度の再調整の際には必ずネジを緩めてからおこなってください。

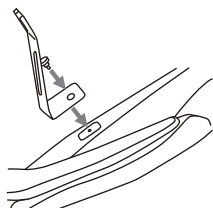

⑫リモコンケーブルをアームレスト(R)前側のループに通し、ボタンをしっかりと閉じます。

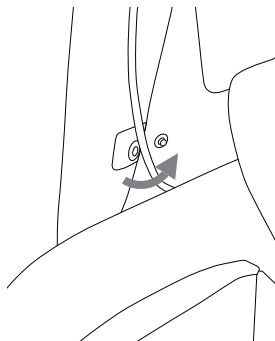

【ご使用の前に】


ご使用の前に

移動の仕方

本体に移動用キャスターがついています。主電源スイッチを「OFF」の状態にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてから運んでください。

リクライニングを倒し、フットレストを上げ、アームレストの下側を持って前側を浮かせ、キャスターで移動してください。

おひとりで持ち運びが難しい場合は、お二人でアームレストの下側を片側ずつ持ち上げ、前側を浮かせてキャスターで移動してください。

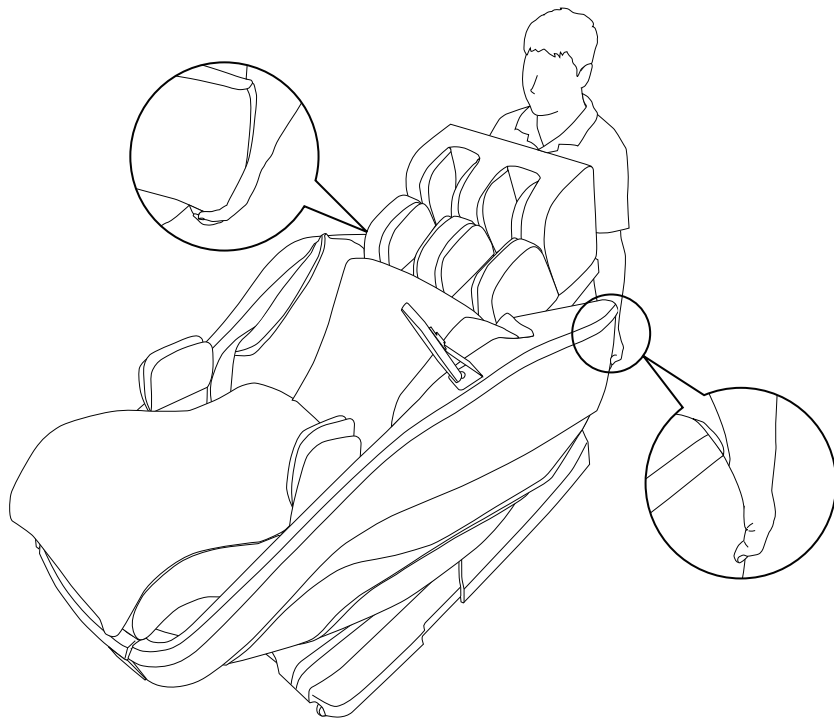

【ご使用の前に】

通常の方法で移動ができない場合は、P.11、12の組立て方法にしたがってアームレストやフットレストを取り外して移動してください。それでも移動できない場合は、裏表紙に記載の販売元までご連絡ください。

- 重量物ですので搬入移動時に、製品を落としたり、ケガ等しないよう、運搬用手袋を装着してください。
- 重量物ですので搬入移動時には腰等を痛めないようご注意ください。
- リモコンがついていますので、移動時に落とさないよう注意してください。




注意

- 木製部品に力がかからないよう注意してください。
- 人をのせたまま移動しないでください。
- 移動の際には足や電源コードなどはさまないように十分注意してください。
- キャスターで床を傷つけないように注意してください。

布地の確認

背パッドのファスナーの間から腕を入れ、本体の布地等に破れがないか確認してください。(右図○部分)
また、その他の部分の布地が破れていないか確認してください。

腕を入れる際は必ず主電源を「OFF」にし、ファスナーや背パッド内側の部品などでけがをしないよう十分に注意してください。

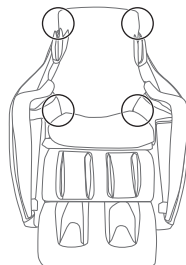


警告

- マッサージの前には必ず本体の布地が破れていないか確認してください。どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、販売元(裏表紙に記載)にご連絡ください。施療部の布地をはずしたり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。

主電源の入れ方

- ① 電源コネクタをインレットに差し込みます。
- ② 電源プラグから出ているアース線を、電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。電源コンセントにアース端子がない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ③ 電源プラグを正しく電源コンセントに差し込みます。
- ④ 本体後部の主電源スイッチを「ON」にします。

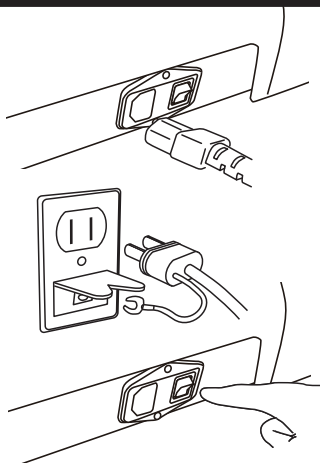

警告

- 変圧器を用いて使用しないでください。
→故障や感電の原因になります。
- 日本国内以外では使用しないでください。
→故障や感電の原因になります。

注意

- 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、主電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。
- ご使用の際にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

椅子の調節

椅子の座り方

メカは通常、収納位置に引っ込んだ状態になっています。
安全のため、メカの位置を確認し、上記以外の場所にメカがある場合はすぐに座らず主電源スイッチを入れて、メカを収納状態に戻してから、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。



注意

- リクライニングを倒したまま椅子に座らないでください。
→背もたれやフットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により、事故やケガの原因になります。
- はじめは弱い刺激でマッサージしてください。


椅子への乗り降りの際、アームレストについている木製手すりの上に手を置いて支えないでください。故障の原因になります。アームレスト上面に手を置いて支えながら、乗り降りをおこなってください。



【椅子の調節】

緩衝パッドの使い方

マッサージが強いと感じられる場合は、付属の緩衝パッドを背パッドや座の上に置いてマッサージをおこなって下さい。

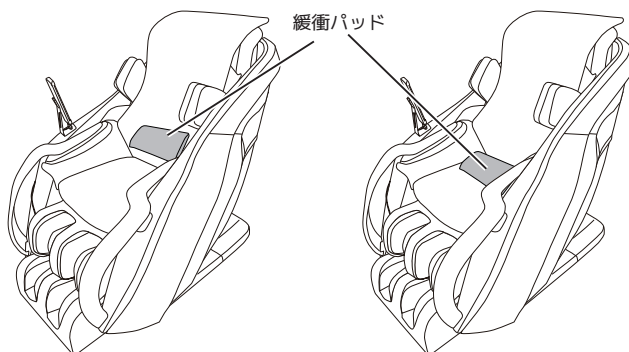


注意

- 緩衝パッドが丸まったり偏ったりしていないことを確認してください。
→故障やケガの原因になります。


アームレストの使い方

下の図のようにアームレストと背もたれの間には肘が来るように腕を置いてください。また、肩引の角度をお好みの角度に調整してください。

アームレストと背もたれの間には肘が来るように腕を置いてください。
手のひらが下向きになるように入れてください。

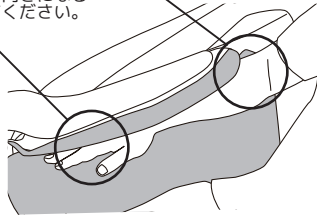

肩引をお好みの角度に調整してください。

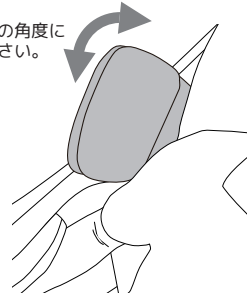

⚠️ 注意

- 腕部以外には使用しないでください。
→ケガの原因になります。
- 腕部のマッサージ中にアームレストから腕が抜けた場合、無理に腕を入れしないでください。
→無理に入れようとすると、故障の原因になります。
- 肘をマッサージしないでください。また、手のひらが下向きになるようにマッサージしてください。他の向きで腕を入れしないでください。
→ケガの原因になります。

リクライニングの使い方

リクライニングボタンを押すことで、背もたれとフットレストの調節が出来ます。

■リクライニングを起こす場合

背の上側のボタンを押すことで背もたれを起こすことが出来ます。このとき、フットレストも連動して下がります。

■フットレストを上げる場合

フットレストの上側のボタンを押すことでフットレストを上げることが出来ます。

リクライニング



背



フットレスト



■リクライニングを倒す場合

背の下側のボタンを押すことで背もたれを倒すことが出来ます。このとき、フットレストも連動して上がります。

■フットレストを下げる場合

フットレストの下側のボタンを押すことでフットレストを下げる事が出来ます。

⚠️ 警告

- マッサージコース開始前やリクライニングを倒すときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろやフットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。

操作方法

コースの種類と特徴

【自動コース】

あらかじめ設定されたメニューにより、目的・用途に応じたコースが簡単に選択出来ます。

クイックコース	(約10分)	マッサージする時間がなかなか取れない方におすすめするコースです。首から足裏まで全身を短時間でマッサージします。
コア指圧コース	(約30分)	全身を独自機能のコア指圧でほぐすことに注目したコースです。指圧動作により、身体の深くにある指圧点を丁寧にほぐしていきます。
リンパコース	(約30分)	全身のリンパの流れにそってマッサージすることに重点をおいたコースです。全身にあるリンパ節に丁寧にアプローチします。
疲労回復コース	(約15分)	全身の疲労回復を目的としたコースです。首のつけ根から足裏まで全身の指圧点をほぐします。
血行促進コース	(約15分)	全身の血行促進に重点をおいたコースです。身体の末端から中心まで血液の循環を意識したマッサージにより、筋肉のこりをほぐしながら血行を促進します。
アクティブコース	(約15分)	身体の末端から血流を心臓に送り返す求心法で静脈の流れに沿ってマッサージを行います。身体をリフレッシュしたいとき、身体を目覚めさせたいときにおすすめのコースです。
快眠コース	(約15分)	心臓から血流を身体の末端に促す遠心法で、動脈の流れに沿ってマッサージを行います。身体をリラックスさせたいとき、おやすみ前におすすめのコースです。
首・肩コース	(約10分)	首のつけ根や首筋、肩上部、肩引を集中的にマッサージするコースです。首や肩に疲れを感じている方、首周りをスッキリさせたい方におすすめのコースです。
腰コース	(約10分)	腰を集中的にマッサージするコースです。腰に疲れを感じている方、腰周りをスッキリさせたい方におすすめのコースです。
むくみ緩和コース	(約10分)	手先や足先などの、身体の末端を重点的にマッサージするコースです。身体の末端を刺激することで全身の血行を促進します。


【手動コース】

お好みの機能を組み合わせること出来ます。また、速さや強さ、上下調節など、マッサージ動作の調節も行えます。

自動コース

自動コースでのマッサージ

- 疲労の回復、改善などを目的とした9種類のコースを用意しています。
- 各コースボタンでお好みのコースを選ぶことにより、あらかじめ設定されたメニューにもとづいてマッサージを行います。

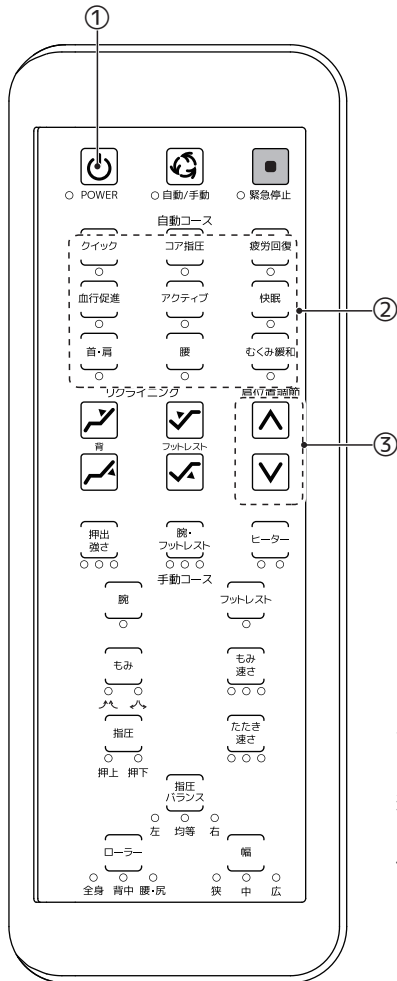

※機種によりリモコンは異なります。
イラストはDC-100J

① POWERボタンを押します。

30分間入力がない場合、自動的に電源が切れます。

② お好きなコースのボタンを押します。

リクライニングがマッサージに最適な角度になるまで動きます。その後、指圧点検索中のブザーが鳴り、指圧点の検索を行います。

【お願い】


深く椅子に腰かけ、楽な姿勢で背もたれに頭を置いてください。体が浮いていると正確に指圧点を検索できません。

③ 肩位置の調節ができます。

指圧点検索後、ブザーの音が「ピピッ」に変わります。ブザーが鳴っている間、肩の位置を調節できます。調節しなくてもよい場合は、そのままにしておきます。

【肩位置の調節】

肩位置が合っていないときはブザーが「ピピッ」と鳴っている間に、肩位置を調節してください。

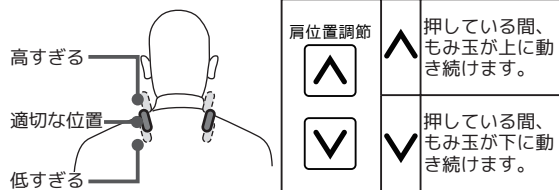

④ コースが始まります。

指圧点の検索が完了すると、ブザーの音がやみ、コースが始まります。マッサージ動作中はメカの強さ調節やエアの強さ調節ができます。

マッサージの強さ調節とヒーターの温度調節、解除

<p>押出強さ</p> <p>腕・フットレスト</p> <p>ヒーター</p>	<p>マッサージの強さ調節とヒーターの温度調節をおこなうことができます。押出強さボタン、腕・フットレストボタンを押すごとに強⇒弱⇒中の順に切りかえることができます。(コース開始時は中に設定されています。)</p> <p>ヒーターボタンを押すごとに弱⇒強⇒切の順に切りかえることができます。(コース開始時は切に設定されています。)</p>
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【自動コース】

⑤ コースが終了します。

もみ玉が収納位置まで戻り、自動でリモコンの電源が「OFF」になります。その後お好みの動作をおこないたい場合は再度リモコンの電源を「ON」にしてください。

- ご使用後はリモコンの電源を「OFF」にしてください。

コース変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切りかえられます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

自動コース→自動コース

自動コース実行中に他の自動コースボタンを押すと、もみ玉が一度検出した肩位置に戻り、肩位置の再確認を行ってから開始します。肩位置再確認中は、肩の位置を調節できます。

自動コース→手動コース

自動コース実行中に自動/手動ボタンを押すと、押した時点で自動コースは中断し、手動コースが選択できるようになります。お好みコースのボタンを押すと、動作を開始します。

コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中にPOWERボタンを押してください。収納動作をおこなった後で停止します。**緊急時**や動作中に**異常を感じたとき**は、緊急停止ボタンを押してください。その場で動作が停止します。

安全確認後、POWERボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。

自動コースはコース選択時にリクライニングが自動で倒れる場合があります。また、コース中にフットレストの角度が自動で動くコースもありますので、ご使用前には後ろに人や障害物がないことを確認して下さい。また、使用中に人が近づかないようご注意ください。


【自動コース】

⚠ 注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。
→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分やリクライニング等の可動部に手や足を入れしないでください。
また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪、付け爪などのかたい物をつけて使用しないでください。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れしないでください。
- マッサージの使用は1日30分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。

手動コース

各部の操作と調節方法

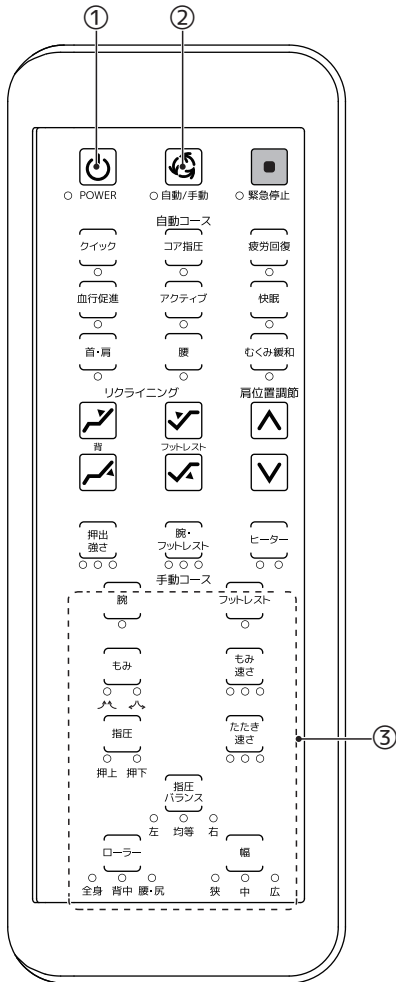

※機種によりリモコンは異なります。
イラストはDC-100J

① POWERボタンを押します。

30分間入力がない場合、自動的に電源が切れます。

② モード選択ボタンを押します。

モード選択ボタンを押すことで、自動コースが選択できる状態から手動コースが選択できるようになります。

③ お好きな動作のボタンを押します。

もみ、たたき、ローラー、指圧、エアーマッサージの中から好みの動作を組み合わせてください。

④ コースが始まります。

マッサージ動作中はメカの強さ調節やエアの強さ調節、エアー動作の解除ができます。

⑤ コースが終了します。





もみ玉が収納位置まで戻り、自動でリモコンの電源が「OFF」になります。その後好みの動作をおこないたい場合は再度リモコンの電源を「ON」にしてください。

● ご使用後はリモコンの電源を「OFF」にしてください。

※一部の機能についてはDC-100Jにのみ搭載されています。

【手動コース】

もみ玉の位置の調節

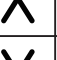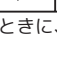肩位置調節  	【ローラーを選択していないとき】 マッサージしたい位置にもみ玉の位置を調節することができます。 ●もみ玉の位置が最上部(最下部)にあるときに、さらに上昇(下降)を選択すると「ピーピー」と警告音が鳴ります。		押している間、もみ玉が上に動き続けます。
			押している間、もみ玉が下に動き続けます。

幅の調節	
	幅調節ができる基本動作中に、もみ玉の幅を狭⇒中⇒広の順に切りかえることができます。(コース開始時は狭に設定されています。)
速さの調節	
	速さ調節ができる基本動作中に、マッサージの速さを3段階に切り替えることができます。(コース開始時は遅く動作するよう設定されています。)
指圧バランスの調節	
	指圧動作中に、指圧の動作のバランスを右⇒左⇒均等の順に切りかえることができます。(指圧動作開始時は均等に設定されています。)
マッサージの強さ調節とヒーターの温度調節、解除	
	マッサージの強さ調節とヒーターの温度調節をおこなうことができます。押出強さボタン、腕・フットレストボタンを押すごとに強⇒弱⇒中の順に切りかえることができます。(コース開始時は中に設定されています。)ヒーターボタンを押すごとに弱⇒強⇒切の順に切りかえることができます。(コース開始時は切に設定されています。)

コース変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切りかえられます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

手動コース→自動コース

手動コース実行中に自動/手動ボタンを押すと、押した時点で手動コースは中断し、自動コースが選択できるようになります。自動コースのボタンを押すと、動作を開始します。コースは肩位置検出を行ってから開始します。

コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中にPOWERボタンを押してください。収納動作をおこなった後で停止します。緊急時や動作中に異常を感じたときは、緊急停止ボタンを押してください。その場で動作が停止します。

安全確認後、POWERボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。


自動コースはコース選択時にリクライニングが自動で倒れる場合があります。また、コース中にフットレストの角度が自動で動くコースもありますので、ご使用前には後ろに人や障害物がないことを確認して下さい。また、使用中に人が近づかないようご注意ください。

⚠️ 注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。
→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分やリクライニング等の可動部に手や足を入れしないでください。また、髪飾り、ネックレス、腕時計、プレスレット、指輪、付け爪などのかたい物をつけて使用しないでください。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れしないでください。
- マッサージの使用は1日30分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。

故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または販売元(裏表紙に記載)までご相談ください。

状態	原因と直し方	
メカの左右のもみ玉の位置がずれている。	交互指圧機構と交互たたき機構を採用しているため、構造上発生するもので、故障ではありません。 	構造上発生するもので、故障ではありません。
もみ玉が肩部へ移動して止まってしまった。	オートタイマー機能により、マッサージ終了時にメカが体に干渉しないように肩部へ移動するようになっています。	
もみ動作をしているとき、もみ玉がスキップすることがある。	人が乗っている時にメカに荷重が大きくかかる箇所とかからない箇所の境目や、体重や体型などの個人差により引かかることがあるためです。	
マッサージ中にもみ玉が途中で止まる。	もみ玉に必要以上の力が加わると、動きが止まることがあります。体を浮かせぎみにするか、リクライニングを軽く起こしてご使用ください。(特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。)	
起動しない基本動作、特殊動作がある。	本体後部の主電源スイッチを「OFF」にし、5秒ほどしてから主電源スイッチを入れ直してください。	点検後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。
自動指圧点検索がうまくいかない。(もみ玉が肩の高さに合っていない。)	椅子に深く腰かけて枕を頭にあててください。指圧点検索直後に肩位置調節ボタンで肩位置を調節できます。	
リモコンのボタンを押しても正常に動作しない。または電源が入らない。	次の点検を行ってください。 ①電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。 ②本体後部の主電源スイッチは「ON」になっていますか。 ③2つ以上のボタンを同時に押していませんか。	
電源コード、プラグが異常に熱い。	ただちに使用を中止してください。	

- サービスマン以外の人は分解や修理は行わないでください。
- お買い上げの販売店、または販売元(裏表紙に記載)までご相談ください。

【故障かな？と思ったら】

動作時の音

動作中は下記のような作動音がします。

たたきを伴う動作時の音	ゴトゴト音
もみ動作時のもみ玉と布のすれる音	キュッキュウ音 ギュウギュウ音
もみ玉の昇降、もみ、指圧動作時の音	ウィーン音
エアーマッサージ中の音	コツコツ音
エアープンプの音	ブーン音
エアーの排気音	シュー音
リクライニング昇降時の音	ウィーン音

※ 上記の音について、性能などに影響はありませんが、音が大きくなってきた場合は故障の可能性がございますので、お買い上げの販売店、または販売元(裏表紙に記載)までご相談ください。

【故障かな?と思ったら】

安全のために点検を

長期ご使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか?

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- その他の異常や故障がある。

左記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止し、電源コードのプラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店または、販売元(裏表紙に記載)に点検をご依頼ください。

愛情点検



安全にお使いいただくために

施療部の布地は消耗品であり、耐用年数は1年です。(使用条件：1日60分、毎日使用した場合)
安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前にお買い上げの販売店、または販売元(裏表紙に記載)での定期点検をおすすめします。

ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。

お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。

点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、または販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。

【安全のために点検を】

Q&A

Q ホットカーペットの上に椅子を置いてもいいですか？

A 火災のおそれがありますのでホットカーペットの上に置くのはおやめください。

椅子は重量物ですのでホットカーペットの発熱体を傷め、そこから発火するおそれがあります。

Q フローリングや床暖房の上に設置しても大丈夫ですか？

A 設置しても大丈夫です。

ただし、床をきずつけることがあるかもしれませんので、カーペットなどを敷き、その上に椅子を設置することをお勧めします。(畳等も同様です)

Q マッサージをより強くするにはどうすればいいですか？

A 次のことを行なってみてください。

- 深く腰かけ背もたれに体重がかかるように座る。
- 強さ調節ボタンで強さを「強」にする。

以上の方法でより強くマッサージを行う事ができます。

Q マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか？

A 次のことを行なってみてください。

- 強さ調節ボタンで強さを「弱」にする。
- 緩衝パッドを施療部分に置く。

以上の方法でより弱くマッサージを行う事ができます。

Q 誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか？

A 感電のおそれがあります。ただちに使用を中止し、次の内容に従ってください。

- 主電源スイッチを「OFF」にする。
- 電源コードのプラグをコンセントから抜く。

以上のことを行った上、お買い上げの販売店または販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。

Q コースが終了したときにリクライニングは自動で動きませんか？

A コース終了時は安全のため、リクライニングは自動では動きませんが、電源を「OFF」にしたときにリクライニングが自動で起き上がります。

Q 身長が150cm未満の人や180cm以上の人でも使えますか？

A お使いいただけます。

Q 体重が重くても大丈夫ですか？

A 体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。

Q 1ヶ月の電気代はいくらですか？

A 1日30分、毎日ご使用いただいた場合、1ヶ月で約60円です。(2021年10月当社調べ)

お手入れと保管の仕方

お手入れの仕方



注意

- お手入れの際は必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

【縫製品のお手入れ】

汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取ってください。



注意

- ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。

【プラスチックのお手入れ】

少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

- アルコール、その他の溶剤やみがき粉などでのお手入れは傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

適しているもの	適していないもの

【木製パネル、木製手すり、リモコンのお手入れ】

木製パネル、木製手すり、リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

- 絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。
→故障の原因となります。

保管の仕方

- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。また、次にお使いになるためのためにお手入れし、付属品とともに湿気の少ないところに保管してください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。



注意

- 直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

アフターサービスについて


1. 保証書について

この製品の保証書について、お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店もしくは販売元からお受け取りください。保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。(修理の際、必要となります。)保証期間は、保証書内に記載されています。ただし、この製品は日本国内専用ですので、外国でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外でご使用の場合は、保証期間中でも有料修理とさせていただきます。

2. 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、22ページの「故障かな?と思ったら」をよくお読みください。点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

- 1) お名前・ご住所・お電話番号
- 2) 販売名・型番…足カバーの後ろ側に貼ってある社銘板をご覧ください。
- 3) 製造番号…足カバーの後ろ側に貼ってある社銘板をご覧ください。
- 4) お買い上げ日
- 5) 故障の状態 (できるだけ詳しくお知らせください。)








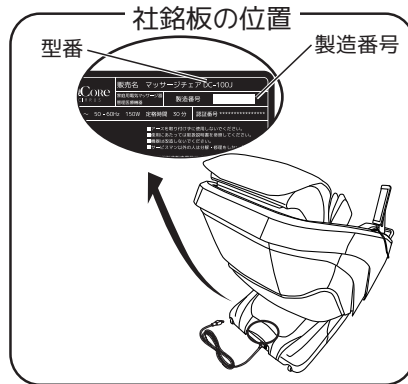










- 保証期間中は
修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間が過ぎている場合は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 販売店にご依頼にできない場合は
販売元(裏表紙に記載)にご連絡ください。
- 補修用性能部品の最低保有期間
弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しております。(ただし、縫製部品、木製部品は除きます。)
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は
お買い上げの販売店、または販売元(裏表紙に記載)にお問い合わせください。
- お買い上げいただいた国以外でご使用になられた場合、修理を承ることができません。

仕様

販売名	マッサージチェア DC-100J	マッサージチェアDC-001J
使用電源	AC100V	
定格消費電力	150W (ヒーターのみの定格消費電力16W)	
定格周波数	50-60Hz	
定格時間	30分	
類別	機械器具(77)パイプレーター	
一般的名称等	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000) 管理医療機器	
医療機器認証番号	304AKBZX00025000	304AKBZX00026000
もみ速さ	最小8回/分、最大20回/分	
たたき速さ	最小300回/分、最大700回/分	
指圧速さ	[背] 最大25回/分 [腕] 最大24回/分 [脚] 最大20回/分 [足裏] 最大40回/分	[足裏] 最大40回/分
もみ玉上下移動速さ	3.0 cm/秒	
マッサージ範囲	90 cm	
もみ玉の押し出し量	7 cm	
エア圧力	約25kPa(50Hz)/約30kPa(60Hz)	
ヒーター	最大45℃	なし
自動コース	9種類	
お好みコース	6種類	5種類
リクライニング角度	水平面に対して約 113° ~約 145° 無段階(電動リクライニング)	
本体の寸法	幅約94cm×奥行約149(184)cm×高さ約126(94)cm 奥行・高さの()内の数字は背もたれを倒した状態の寸法	
質量	約135kg	約125kg
外装布地	合成皮革	
付属品	電源コード、リモコンホルダー、緩衝パッド	
包装	2梱包 / 1台	
製造販売元	ニン株式会社 大阪府大阪市中央区淡路町2丁目1-10	

【仕様】

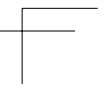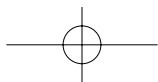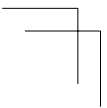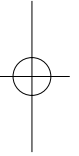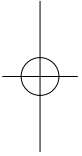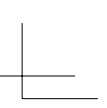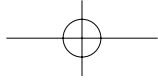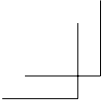

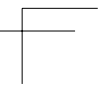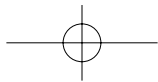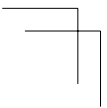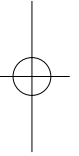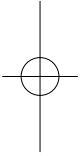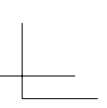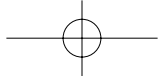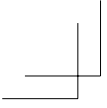

〈キリトリ線〉

保証規定

- 保証期間内に万一発生した故障については修理料金を無償といたします。
 - ・修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
 - ・お買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（0120-130-700）にご連絡ください。
 - ・ご転居の場合やご贈答品等で本保証書に記入のお買い上げ店が無償修理をお受けにできない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（0120-130-700）にご相談ください。
 - ・この商品は、出張修理させていただきますので、修理に際し、本書をご提示ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - (1) お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合
 - (2) 火災・天災・異常電圧などによる故障・損傷の場合
 - (3) 機器を改造や修理された場合
 - (4) 取扱説明書に記載の使用方法、および注意に反するお取扱いによって発生した故障・損傷の場合
 - (5) 本保証書を提示されない場合
 - (6) 本保証書のお買い上げ店名、およびお買い上げ年月日の未記入あるいは字句を訂正された場合
 - (7) 一般家庭以外（業務用など）でご使用されていた場合
- 本保証書は日本国内において有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書を参照ください。
- 本保証書の記載内容については『修理等に関するお問い合わせ窓口』（取扱説明書に記載）にご相談ください。

修理メモ

※This warranty is valid only in Japan

〒107-0062
東京都港区南青山2丁目4番8号
ニン株式会社
電話 03-5843-1048 (代)

製品に関するお問い合わせ窓口
0120-380-200

修理等に関するお問い合わせ窓口
0120-130-700

土・日・祝を除く平日 9:00～18:00



ニン株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山2丁目4番8号
<http://nin-japan.co.jp>

（キリトリ線）

ニン株式会社 マッサージ器保証書

品番	DC- J	製造番号	
	お名前		
お客様	様		
	ご住所 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	電話 ()		
お買い上げ店名 住所・電話番号			
お買い上げ日	保証期間	1年間	
	保証対象	本機	

- 正常なご使用状態（取扱説明書に記載）で万一発生した故障については、お買い上げ日から上記の期間、裏面の保証規定により、その故障の修理料金を無償といたします。
- 本保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 製造番号は、取扱説明書をご参考にしていただき、かならずご記入ください。
- お買い上げ時の領収書またはお買い上げ証明書は、本書にかならず貼り付け、大切に保管してください。

2021年 12月 20日 作成 (第1版)
